



Inhaltsverzeichnis / Contents:

Kurzanleitung / Quick instruction

1. Vorbereitende Tätigkeiten <i>1. preparatory activities</i>	Seite 02 <i>Page 02</i>
2. Montage <i>2. Installation</i>	Seite 03-05 <i>Page 03-05</i>

Montage- und Bedienungsanleitung / Installation and operating instructions

Patentschloß II einsetzen <i>patent lock II insert</i>	Seite 06 <i>Page 06</i>
Holzoberflächenset <i>wood care set</i>	Seite 07 <i>Page 07</i>

Kurzanleitung / **Quick instruction**

Reisebett / **Travel bed**

1. Bitte die Hülle entfernen.
Please remove the cover.



2. Bitte den Deckel abnehmen.
Please remove the cup.



3. Die Seitengitterelemente herausnehmen und die Hülle in die Box legen.
Please take out the barred side elements and put the cover in the box.



Kurzanleitung / **Quick instruction**

Reisebett / **Travel bed**

4. Bitte die Box schließen und zur Seite fahren.

Please close the box and move the the box sideways.



5. Die Elemente mit 2 Schrauben (M16x55) verbinden.


Please fix the elements with 2 screws M 16x55.




Kurzanleitung / **Quick instruction**

Reisebett / **Travel bed**

6. Bitte ein weiteres 100er Element mit 2 Schrauben (M 16x55) verbinden.
Please fix another 100er element with 2 screws M 16x55.

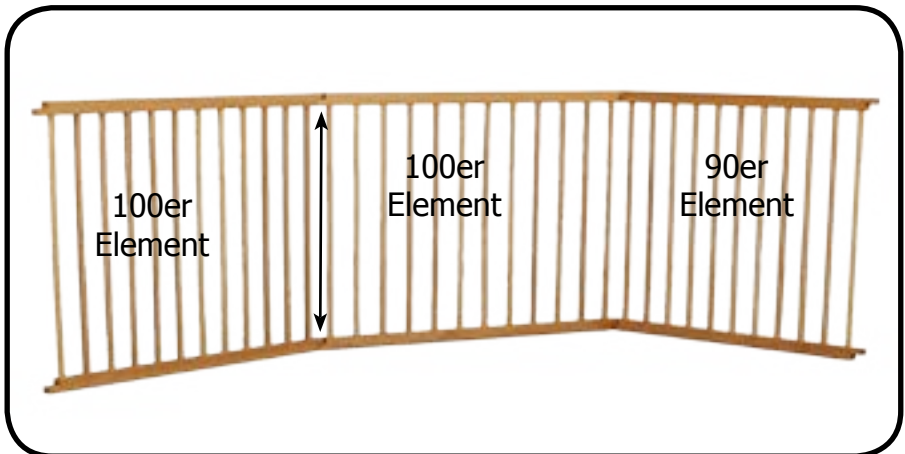

7. Dann ein weiteres 90er Element mit 2 Schrauben (M16x55) verbinden.
Then fix another 90er element with 2 screws M 16x55.

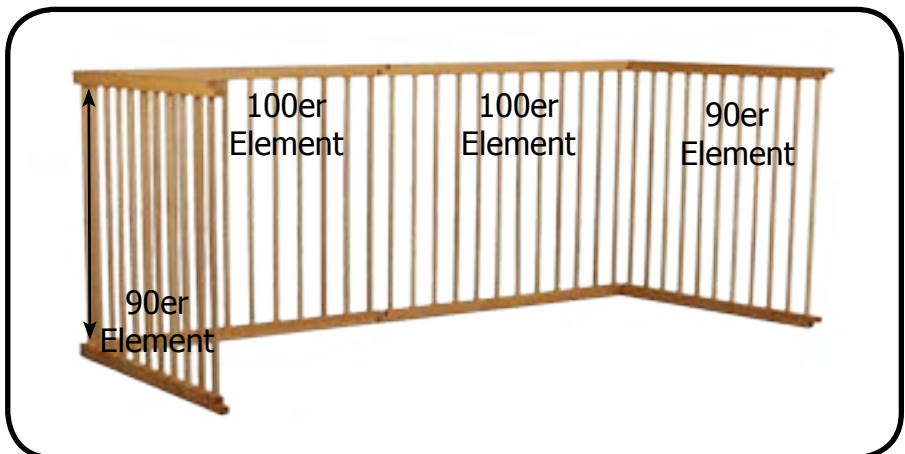


Kurzanleitung / **Quick instruction**

Reisebett / **Travel bed**

8. Bitte noch ein weiteres 100er Element mit 2 Schrauben (M 16x55) verbinden.
Please fix another 100er element with 2 screws M16x55.




9. Dann das Türelement mit 4 Schrauben (M16x55) einsetzen.
Please fix the door element with 4 screws M16x55.

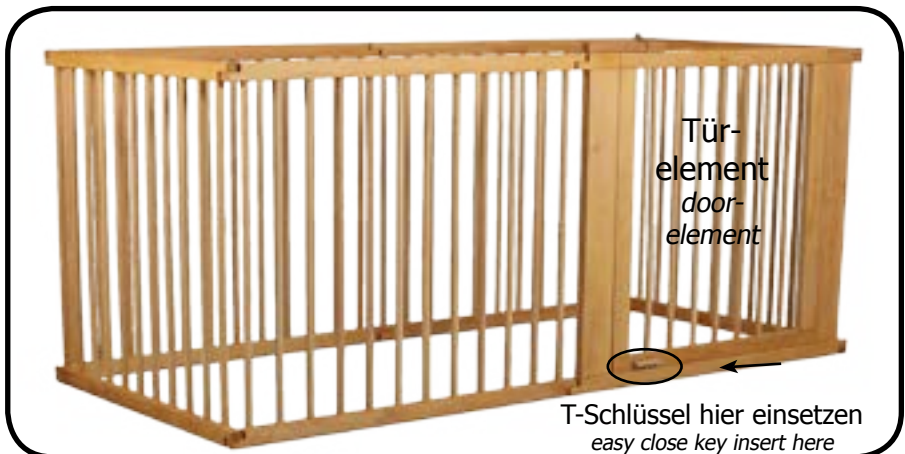

Kurzanleitung / **Quick instruction**

Reisebett / **Travel bed**

10. Bitte das Patentschloß II in die Schiene in der Tür einsetzen.
Please fit the patented lock II in the rail of the door.

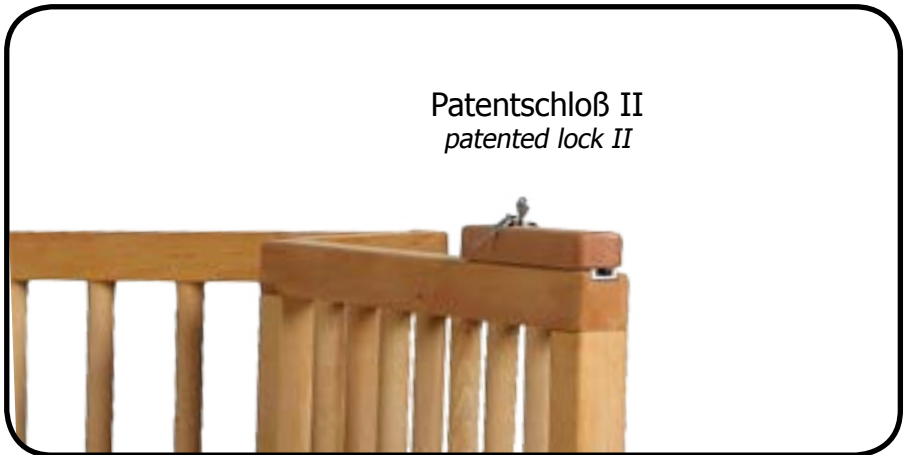

11. Hier sehen Sie das Patentschloß II im geschlossenen Zustand.
Es lässt sich in beiden Positionen (offen und geschlossen)
durch das Zylinderschloß fixieren.

Here you can see the patented lock II, if it is close. You can fix the patented lock II in both position. (open and close)



Care instruction travel bed

Holzoberflächenpflegeset / wood care set



Inhalt:

Öl-Wachs

Neutralreiniger

Baumwolltuch

Schleifvlies

Anwendungsbeschreibung

Contents:

oil wax

neutral cleaner

cotton cloth

abrasive fleece

application description

Ihr Fachhändler:



www.savi.de

info@savi.de

SAVI GmbH
Reha Solutions
Lise-Meitner-Str. 10
D-48691 Vreden

Postfach 1123
D-48684 Vreden
Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70
Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60