

Knut



QR-Code scannen und unser
neues Seitengitter „hide away“
kennenlernen.



Seitengitter
„hide away“

NEU

Sicher kuscheln im Knut – Das Bett mit hohem Maß an Sicherheit.

Dank der vierflügeligen Faltschiebetür und der elektrischen Liegehöhenverstellung bietet das Bett eine sehr gute Therapieunterstützung.



Trendelenburg- /Antitrendelenburg-funktion



elektrisch
höherverstellbar



Kopf- / Fußelement manuell
verstellbar oder optional
elektrisch verstellbar

Neugierig wie Knut (a) (100 x 200 cm,
Seitengitterhöhe 64 cm) in Ihrem
Kinderzimmer aussieht?



QR-Code scannen und das
Kinderbett optisch in Ihrem
Kinderzimmer platzieren!



Mehr Infos zum
Knut:
www.savi.de/betten/knut-a
www.savi.de/betten/knut-b
www.savi.de/betten/knut-c
www.savi.de/betten/knut-b-40

Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:

19.40.01.6115

Pflegehilfsmittel-Nr.:

50.45.01.2115

EN 60601-2-52

DIN EN 50637

gemäß MDR (Medical Device Regulation)

CE-Kennzeichnung

Konformitätserklärung

Knut

Warum ein Bett von SAVI?

- Große Sicherheit für Ihr Kind
- Biologisch neutral, schadstofffrei (DIN EN 71-3)
- Stabilität und Zuverlässigkeit
- Komfortabel, rückschonende Pflegehöhe elektrisch
- Viele Bettgrößen
- Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- Optimaler Blickkontakt zu Ihrem Kind
- Großer sicherer Innenbereich
- Farbenfrohe Polster für maximalen Schutz
- Kurze Lieferzeiten



Knut's individuelle Stärken

- Seitengitter von 64 - 89 cm
- Trendelenburg- /Antitrendelenburgfunktion
- Schubkasten/ Stauraum (optional)
- Türen oder absenkbare Seitengitter (optional)
- Niedriger Einstieg ab 21 cm (optional)



Alle Modellvarianten sind mit alternativen Seitengitterhöhen lieferbar

Knut (a)

Seitengitterhöhe 64 cm,
Liegehöhe 41 bis 76 cm oder
31 bis 66 cm (kleine Rollen)



Knut (b)

Seitengitterhöhe 78 cm,
Liegehöhe 41 bis 91 cm oder
31 bis 81 cm (kleine Rollen)



Knut (c)

Seitengitterhöhe 89 cm,
Liegehöhe 31 bis 101 cm oder
21 bis 91 cm (kleine Rollen)



Hinweis:

Bei Knut (c) und absenkbaren
Seitengittern verändert sich die
Liegehöhe auf 41 - 111 cm!

Technische Daten

Liegefläche	Außenmaß	Artikel-Nr.
100 x 200 cm	113 x 218 cm	
90 x 200 cm (Größe L)	103 x 218 cm	
90 x 170 cm (Größe M)	103 x 188 cm	
70 x 140 cm (Größe XS)	83 x 158 cm (Knut (c) 103 x 158 cm)	
65 x 155 cm (Größe S)	78 x 173 cm (Knut (c) 98 x 173 cm)	

Türen

vierflügelige Faltschiebetür		•
beidseitig vierflügelige Faltschiebetür	99.750	+
Faltdür in der 270° Version	99.704	+
beidseitig Faltdür in der 270° Version	99.704BEID	+

Verriegelung der Türen

Kindersicheres SAVI-Schloss I		•
Kindersicheres SAVI-Schloss I aus Metall	40100003	+
SAVI-Schloss II	99.033	+
SAVI-Schloss III	99.034	+
SAVI-Schloss IV	99.034A	+

Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen	Seltengitterhöhe	
(a) 41- 76 cm elektrisch	64 cm ⁽²⁾	113.41.005 • Knut (a)
(b) 41- 91 cm elektrisch	78 cm ⁽²⁾	127.41.005 • Knut (b)
(c) 31-101 cm elektrisch	89 cm ⁽²⁾	127.31.705 • Knut (c)

absenkbares Seltengitter*		bei Seltengitterhöhe	
(+14 cm Außenlänge)	manuell	64 cm	99.710 +
	elektrisch		99.710EL +
	manuell	78 cm	99.712 +
	elektrisch		99.712EL +
	manuell	89 cm	99.714 +
	elektrisch		99.714EL +

2 absenkbare Seltengitter*		bei Seltengitterhöhe	
(+14 cm Außenlänge)	manuell	64 cm	99.711 +
	elektrisch		99.711EL +
	manuell	78 cm	99.713 +
	elektrisch		99.713EL +
	manuell	89 cm	99.715 +
	elektrisch		99.715EL +

Seltengitter „hide away“ (nur bei a+b)		bei Seltengitterhöhe	
(+14 cm Außenlänge)		40 cm	99.710HIDEAWAY40 +
		64 cm	99.710HIDEAWAY64 +

2 Seltengitter „hide away“ (nur bei a+b)		bei Seltengitterhöhe	
(+14 cm Außenlänge)		40 cm	99.710HIDEAWAY40B +
		64 cm	99.710HIDEAWAY64B +

Lattenrahmen

Kopf- /Fußelement manuell	99.030	•
Kopf- /Fußelement elektrisch	99.200	+
Trendelenburg-/Antitrendelenburgfunktion (Schrägstellung des kompletten Bettes)		•

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

(1) Hinweis:

In Kombination mit absenkbaren Seltengittern nicht möglich.

(2) Hinweis:

Alle Modellvarianten sind mit alternativen Seltengitterhöhen lieferbar.

Technische Daten

Fahwerk

4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff		•
4 Buchenholz Designrollen	99.885	kostenlos
ohne Rollen o. kl. Rollen ⁽¹⁾ , dann Liegehöhe ca. 10 cm niedriger	99.882	kostenlos
Zentralfeststeller für Vierrollenfahwerk mit Totalfeststeller**	99.887ZENTRAL	+

Holzart

Buchenholz „Natur geölt“ (weitere Farben siehe Seite 79)		•
--	--	---

Matratzen

Polyschaum RG 35	99.031.4	•
Kaltschaummatratze	99.031.5	a.A.
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)	99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)	99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug	99.031.3ZA50	+

Farbakzente

In Natur	90.100	kostenlos
In Gelb	90.128	kostenlos
In Orange	90.204	•
In Blau-Ilja	90.405	kostenlos
In Purpur	90.406	kostenlos
In Blau	90.515	kostenlos
In Grün (weitere Farben siehe Seite 78)	90.618	kostenlos

Ausstattungen

Kindernamen auf der Bettselte	Kindernamen	kostenlos
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		kostenlos
Plexiglas rundum anstatt Stäbe		a.A.
Plexiglas im unteren Bereich des Kopf- / Fußendes (Serie bei c)		a.A.
externe Türsicherung an der Bettselte	99.706	+
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Aufrichter mit Haltegriff	99.820	+
Schubkasten (2 Stück)	99.040	+
Motorabdeckung	99.803	+
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+

Polsterungen

Motmpolster MALU, 50 cm	99.050MALU	+
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051	+
feste Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.053	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

* Hinweis:

Wird das Modell (c) mit absenkbaren Seltengittern (Artikel-Nr.: 99.710 - 99.715) bestellt, verändert sich die Liegehöhe auf 41 - 111 cm.

** Hinweis:

Die Höhenmaße verändern sich um ca. + 3 cm zur Standardrolle.

Knut

„hide away“ – das Seitengitter für mehr Freiraum in Ihrem Schlafzimmer

(nur bei Knut a+b möglich)

Dank des, wie aus Zauberhand verschwindenden Seitengitters, das nach dem Hinuntergleiten in einem Fach unter dem Lattenrahmen verschwindet, wird die Nutzung für Sie zum wahren Vergnügen.

- Einfach, manuell zu bedienen
- Lässt sich stufenweise absenken
- Ein- oder Beidseitig möglich
- Seitengitter „verschwindet“ unter dem Bett



Auch mit Lexan erhältlich!

Perfekt auch in Kombination mit Schubkästen!


Unser neues Seitengitter wurde beim Patent- und Markenamt angemeldet.



Sicherheit an erster Stelle: Zentralfeststeller für 4-Rollen-Fahrwerk

(nur bei Knut a+b möglich)

Dank des neuen Zentralfeststellers ist es nun möglich alle vier Rollen gleichzeitig festzustellen. Hierdurch ist es nicht notwendig an jeder einzelne Rolle den Feststeller zu betätigen und verhindert somit, dass möglicherweise eine Rolle übersehen wird. Dies hilft die Standsicherheit des Bettes zu erhöhen.

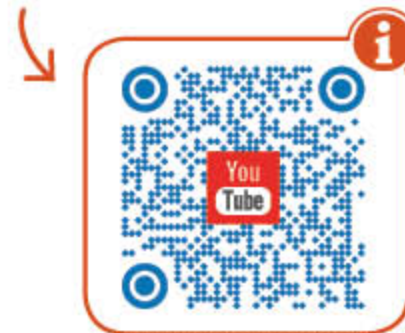

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren!



Offene Seitenfront dank vierflügeliger Faltschiebetür

Durch den Faltschiebemechanismus bietet die Tür in jeder Position höchste Stabilität und einen präzisen Lauf. Die gesamte Seitenfront kann so geöffnet werden. Hier harmonisieren Qualität und Funktion. Auf Anfrage gibt es selbstverständlich angepasste Zusatztüren.



z. B. in der Holzfarbe „Barrique“



ID: 32973
Weiß lackiert



ID: 34771

Eckdaten von Knut

- Seitengitterhöhe 64 cm,
Seitengitterhöhe 78 cm,
Seitengitterhöhe 89 cm,
in allen Modellvarianten,
andere Höhen auf Anfrage

- Liegehöhe:

Knut (a)

41 bis 76 cm
(mit kleinen Rollen 31 - 66 cm)

Knut (b)

41 bis 91 cm
(mit kleinen Rollen 31 - 81 cm)

Knut (c)

31 bis 101 cm
(mit kleinen Rollen 21 - 91 cm)

Hinweis zu Knut (c):

Bei absenkbaaren Seitengittern
verändert sich die Liegehöhe auf 41 cm!

- Trendelenburg-/Antitrendelenburgfunktion
- Vierflügelige Faltschiebetür
- Plexiglasverkleidung (optional)
- Absenkbares Seitengitter (optional)
- Seitengitter „hide away“ (optional)
- Zentralfeststeller (optional)
- Feste Skai-Polsterung (optional)



ID: 34505
Liegefläche 140 x 200 cm



ID: 36476
mit Zentralfeststeller



ID: 34469

Absenkbares Seitengitter



ID: 20355



ID: 34146



ID: 31399

Sicherheitsgriffmulde

- Einfach manuell zu bedienen
- Der Sicherheitsabstand der beiden Mulden verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Schiebeknöpfe)
- Rasterverstellung



ID: 36128





Ausführungen mit absenkbarem Seitengitter

Unser absenkbares Seitengitter ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:



Ausführung 1

Absenkbares Seitengitter „hide away“, verschwindet wie durch Zauberhand unter dem Bett.



ID: 19926

Ausführung 2

Absenkbares Seitengitter mit durchgehendem Aufsteckelement.

Dieses kann nur abgenommen werden, wenn das Seitengitter herab gelassen wird.



ID: 18568

Spezial-Ausführung 3

Absenkbares Seitengitter mit abklappbarem Aufsteckelement.

Achtung: Nur in Kombination mit einem elektrischen Seitengitter möglich!

Vorzüge des elektrisch verstellbaren Seitengitters

- Einfach per Knopfdruck zu bedienen
- Abschließbares Bedienteil verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Bedienung auch von Personen mit Handicap möglich
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Knopfdruck)
- Stufenlos regulierbar



ID: 19046

Kleiner Tipp:

In diesem Katalog können Sie viele Bett-Varianten entdecken, die wir bereits produziert haben. Zu erkennen sind sie an der „ID“-Angabe unter den Abbildungen.



Komplett umklappbare 270° Tür

- Einfach manuell zu bedienen
- Türen an Kopf- und Fußelement komplett umklappbar
- 270° Version auch mit fester Skai-Polsterung möglich



„Das sind tierisch gute Betten!“



ID: 36603
Holzfarbe „Teak“



ID: 36738

Das Plus, wenn es um die
Intensiv-Pflege geht

Schlauchdurchführung/Versorgungsöffnung

Unsere Schlauchdurchführung/Versorgungsöffnung ist in folgenden Ausführungen erhältlich:



Versorgungsöffnung (Loch)
mit Verschlussmechanismus



Schlauchdurchführung
(Spalt)



Ablagefach mit
Schlauchdurchführung
zum Einhängen



ID: 32583
Schlauchdurchführung (Spalt)



ID: 38446
Ablagefach mit
Schlauchdurchführung
zum Einhängen



ID: 34214
Schlauchdurchführung
(Spalt)



ID: 36496
Versorgungsöffnung (Loch)
mit Verschlussmechanismus



Knut

Optimaler Schutz dank fester Skai-Polsterungen

Ihr Kind ist sehr aktiv? Mit der fest integrierten 75 mm starken Skai-Polsterung bieten Sie Ihrem Kind optimalen Schutz.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Polsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 79/80!

Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!
Eine Vorauswahl finden Sie auf unserer Internetseite unter:
www.savi.de/bettpolster



ID: 32960



Viele Holzfarben möglich (siehe S. 79)



ID: 34677



ID: 35645



ID: 33205



ID: 34230



Durchblick dank integrierter Vinylfenster

Die integrierten Vinylfenster fügen sich flächenbündig in die feste Skai-Polsterung ein und bieten somit eine ähnliche Polsterwirkung wie die fest integrierte Schaumstoffpolsterung. Die Fenster bieten den optimalen Durchblick. So haben Sie Ihr Kind besser im Auge und Ihr Kind fühlt sich sichtbar wohler.



ID: 20272

Versorgungsöffnung (Loch)

Auf Wunsch erhalten Sie unsere feste Skai-Polsterung auch mit integrierter Versorgungsöffnung.



Kantenpolsterung




ID: 34177



Scannen Sie den QR-Code und erfahren mehr über unsere feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern und deren Polsterfähigkeit!

Knut (b) 40

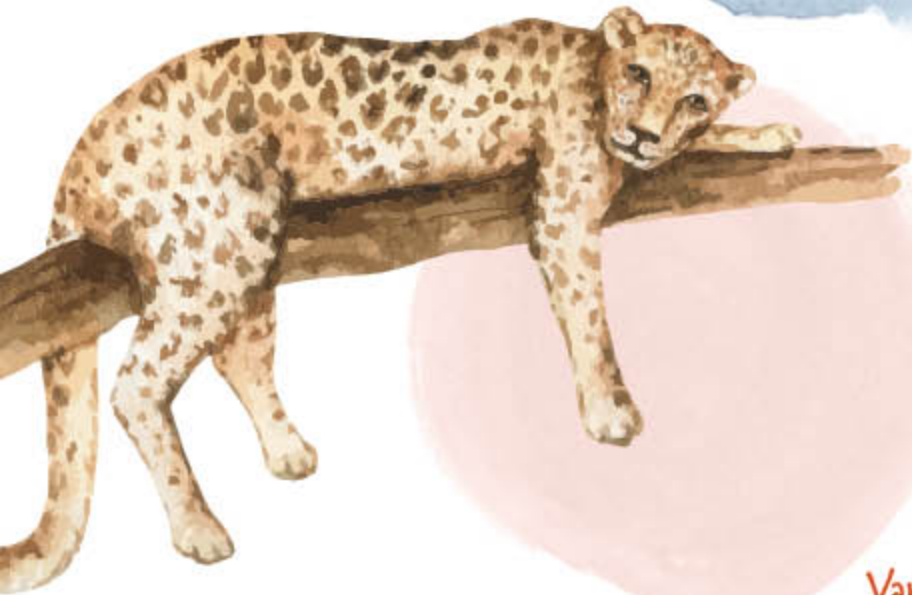

Knut (b) 40's individuelle Stärken

- 64 cm Seitengitterhöhe
- Trendelenburg-/Antitrendelenburgfunktion
- Schubkasten/Stauraum (optional)
- Absenkbares Seitengitter beidseitig (optional)

Seitengitterhöhen

- Seitengitterhöhen von 40 cm + Aufsteckelement 24 cm (Gesamthöhe 64 cm zur Einhaltung der gesetzlichen Auflagen)
- Liegehöhe 41 bis 91 cm

Variabel und sicher



absenkbares Seitengitter beidseitig (optional)



niedrige Seitengitterhöhe durch entfernbares Aufsteckelement beidseitig (optional)



einseitig absenkbares Seitengitter mit 24 cm Aufsteckelement (serienmäßig)

Technische Daten

Liegefläche	Außenmaß	Artikel-Nr.
90 x 200 cm (Größe L)	106,5 x 232 cm	127.41.005.L
90 x 170 cm (Größe M)	106,5 x 202 cm	127.41.005.M
Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen	Seltengitterhöhe	
41 - 91 cm elektrisch	64 cm bzw. 40 cm	
Absenkbares Seltengitter	bei Seltengitterhöhe	
(+14 cm Außenlänge) manuell	64 cm	99.710 •
elektrisch	64 cm	99.710EL +
2 absenkbare Seltengitter	bei Seltengitterhöhe	
(+14 cm Außenlänge) manuell	64 cm	99.711 +
elektrisch	64 cm	99.711EL +
Lattenrahmen		
Kopf- / Fußelement manuell		99.030 •
Kopf- / Fußelement elektrisch		99.200 +
Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion (Schrägstellung des kompletten Bettes)		•

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung



Technische Daten

Holzart		
Buchenholz „Natur geölt“ (weitere Farben siehe Seite 79)		•
Matratzen		
Polyschaum RG 35	99.031.4	•
Kaltschaummatratze	99.031.5	+
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)	99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)	99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug	99.031.3ZA50	+
Farbakzent		
In Natur	90.100	kostenlos
In Gelb	90.128	kostenlos
In Orange	90.204	•
In Blau-Lila	90.405	kostenlos
In Purpur	90.406	kostenlos
In Blau	90.515	kostenlos
In Grün (weitere Farben siehe Seite 78)	90.618	kostenlos
Ausstattungen		
Kindername auf der Bettseite	Kindername	kostenlos
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		kostenlos
Plexiglas rundum anstatt Stäbe		a.A.
Plexiglas im unteren Bereich des Kopf- / Fußendes (Serie bei c)		a.A.
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Aufrichter mit Haltegriff	99.820	+
Schubkasten (2 Stück)	99.040	+
Motorabdeckung	99.803	+
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Polsterungen		
Motivpolster MALU, 50 cm	99.050MALU	+
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051	+
feste Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.053	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Gestalten Sie Ihr



-Wunsch-Kinderpflegebett selbst!



Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

1. Größe der Liegefläche?

- 65 x 155 cm 70 x 140 cm 90 x 170 cm
 90 x 200 cm 100 x 200 cm andere Größe: _____

2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein? Höhe in cm: _____

3. Benutzen Sie einen Patientenlifter? Ja Nein

4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

- 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm andere Höhe: _____

5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung? Ja Nein

6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

- nicht verstellbar manuell verstellbar Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)
 elektr. verstellbar Trendelenburgfunktion

7. Welche Türen wünschen Sie?

- 4-flügelige Faltschiebetür 270° Tür Falttür Seitengitter „hide away“
 absenkbares Seitengitter elektrisch absenkbares Seitengitter

8. Wie viele Türen benötigen Sie?

- Bettseite vorne Bettseite hinten Kopf- und Fußelement

9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

- SAVI-Schloss I SAVI-Schloss II SAVI-Schloss III SAVI-Schloss IV

10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?

- Ja. In welchem Bereich: _____ Nein

11. Welche Holzart/-farbe soll das Bett haben? Holzart: Buche Kiefer

- Holzfarbe: Natur Basalt Wenge Barrique Teak Nussbaum
 Weiß gebeizt Weiß lackiert

12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

- Natur Gelb Orange Blau-Lila Purpur Blau Grün
 Weiß Grau Rot Pink andere Farbe: _____
 bunte Gitterstäbe Kindername: _____

13. Beweglichkeit des Bettes? mit Rollen ohne Rollen

14. Soll das Bett Schubkästen haben? Ja Nein

15. Wird eine Matratze benötigt? Ja Nein

Wenn ja, welche?

- Polyschaum Federkern Kaltschaum Reha-Star II
 Reha-Star Plus Inkontinenzbezug

16. Wünschen Sie eine Polsterung? Ja Nein

Wenn ja, welche?

- lose Skai-Polsterung feste Skai-Polsterung Kantenpolsterung Motivpolsterung MALU

Höhe der Polsterung: _____ Farbe der Polsterung: _____

17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

- Ja. Wenn ja, welcher Bereich? _____ Nein

18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

- Eingriffschutz Netzdach Infusionshalter Fußausschnitt (z.B. für Patientenlift)
 Matratzenhalter Aufrichter Schubkästen abnehmbare Eckpfosten (Niklas)
 Schlauchdurchführung (Spalt) abschließbare Handschalterbox Einstiegshilfe aus Kunstleder
 Versorgungsöffnung (Loch) mit Verschießmechanismus
 Zentralfeststeller für 4-Rollen-Fahrwerk (nur Knut a+b)

Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.

Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum

Firmenstempel

So geht's ganz schnell:

Schicken Sie uns einfach Ihre Bestellung per E-Mail oder nutzen Sie unser Online-Formular unter: www.savi.de

SAVI GmbH Reha Solutions

Lise-Meitner-Str. 10 Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70

D-48691 Vreden Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60