

31. Onderhoudslijst van werkzaamheden voor de gebruiker/dealer

Ongeacht de periodiek voorgeschreven controles dienen voor gebruik resp. opnieuw ingebruikname van het bed enkele controles en onderhouds- werkzaamheden zodanig te worden uitgevoerd dat volgens de huidige stand van kennis van de medische wetenschap geen gevaar voor de patiënt en het verplegend personeel ontstaat.

Na het onderhoud dient het formulier zoals voorgeschreven door de gebruiker resp. de dealer te worden gearhiveerd.

Benaming:

Identificatie-Nr.:

Bouwjaar:

32. Onderhoud van de elektrische installatie

De gebruiker van een elektrisch aan-gedreven bed is volgens de geldende ongevalvoorkomende voorschriften BGV A2 (VGB 4) verplicht dit halfjaar-lijks door een eletrotechnicus te laten controleren.

Deze controle dient een functietest van het bed, een zichtcontrole, een isolatieweerstandmeting en een ard-lekmeting te omvatten.

Met de handtekening verklaart deze persoon de opgevoerde werkzaamheden uitgevoerd te hebben.

Onderhoud/controlle is gedaan op:

Volgende controle/onderhoudsbeurt:

Onderhoud/controlle is gedaan op:

Volgende controle/onderhoudsbeurt:

Handtekening:

Stempel van de uitvoerende werkplaats:

33. Voorbereidende werkzaamheden voor de zichtcontrole

Matras verwijderen, eventueel het verpleegbed of onderdelen ervan voor de zichtcontrole reinigen

Zichtcontrole

- Framedelen dienen op plastische vervorming, breuken of slijtage te worden gecontroleerd
- Bedbodem
- Bedliff
- Hoofdeind, zitgedeelte, voetgedeelte
- Papegaai
- Papegaai uitsparing
- Wielen
- Aanbouwdelen en toebehoren controleren op beschadigingen, roest en lakschade

Functietest van de uitvalbescherming

- Vergrendeling, bijv. ruimte op de vergrendeling
- Afstanden, ook bij belasting
- Vervorming
- Slijtage door belasting

Opmerking:

Ook dient er op te worden gelet dat het niet mogelijk is dat personen tussen de spijlen door glijden.

Algemene controle

- Bevestigingsschroeven op goed vast zitten controleren
- Bevestiging van alle verstelelementen controleren

Zwenkwielen

- Zwenkwielbevestiging controleren
- Zwenkwielen controleren op toestand, functie en loopwijze

Vastzetrem

- Vastzetrem op functie controleren

Functietest van de aandrijving

- Inspecteren van het gehele verstelbereik van de motor (geluid, snelheid, vrij lopen enz.)
- Eindafstelling (bijv. stroombegrenzing eind schakelaar)
- Alle schroefverbindingen controleren*

Controle van de interne bekabeling

- Kabelvoering resp. kabelbevestigingen, incl. kabeldoorvoeren
- Zichtcontrole op beschadigingen van de leidingen
- Plaats van het stopcontact
- Controleren van de O-ringen aan de stekker-verbindingen, indien aanwezig

Behuizing

- Zichtcontrole van alle behuizingen op beschadigingen, schroeven moeten goed vast zitten, afdichtingen mogen geen zichtbare beschadigingen hebben

Electrische installatie

- De isolatie aan de onderdelen van de metaalbehuizing nalopen (isolatieweerstand-, aardlekmeting)
- Elektrische aansluitingen op beschadiging en functie controleren

Oliën/smeren

- Draaipunten en lagers van de bedienhandels en bewegende delen

* Alleen de 4 schroeven die de aandrijving met het hoofd- en voeteind verbinden (boutkoppen wijzen naar de binnenkant van het bed) moeten ietsjes los en met schroeven-kleef middel gefixeerd worden. S.v.p. deze schroeven **niet** vast aandraaien.

(Gevaar voor motorschade!)